

MASQUES CHIRURGICAUX

Masques de Type IIR

Masques **Chirurgicaux**
Masques «3 plis»
Type II R (EFB> 98%)

EN 14683



Masques à usage unique de Type II R. Masques chirurgicaux de type 3 plis qui protège l'entourage et l'environnement de l'utilisateur des risques de contamination bactérienne. Voir les instructions de pose pour profiter au maximum de son efficacité. Élastiques au niveau des oreilles. Bandelette réglable au nez. 4 heures d'efficacité. Boîte de 50 masques.

Dimensions produit

Taille unique (175x95mm)

Type

Masque chirurgical de Type II R (EFB> 98%) - Résistant aux éclaboussures
Masque 3 plis à usage unique

Pcs/ Pack

Boîte 50pcs - 195x100x100mm
(optionnel: sachets individuels)

Couleur

Couleur : Noir

DDM

Utilisation maximale : 4 heures
Date de durabilité minimale: 2 ans



Produit d'import
Fabriqué en Europe
Distribué par :
Laboratoire Solugerm

Normes

**Conforme à la norme européenne
NF EN 14683 (2019) EFB >98%**

Masque chirurgical de type 2-R. Filtration bactérienne supérieure à 98 %. Conforme à la norme NF EN 14683. Masques 3 plis avec fixation par sangles élastiques. Ce masque est également «R» : résistant aux éclaboussures.

Matériaux

Couches extérieures: (x2)
- Textile non tissé polypropylène: 25g / m2
Couche intermédiaire:
- Textile non tissé/ «Meltblown»: 25g / m2
Barre de nez: longueur 95 mm, (plastique + métal)
Boucle de fixation (oreilles): Fil élastique 160mm

Utilisation

1. Se laver les mains à l'eau et au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique avant toute manipulation du masque.
2. Repérer le haut du masque. Placer le masque chirurgical sur le visage, la barrette nasale sur le nez
3. Tenir le masque de l'extérieur et passer les élastiques de part et d'autre des oreilles, sans les croiser
4. Abaisser le bas du masque sous le menton. Vérifier que le masque chirurgical couvre bien le menton
5. Pincer la barrette nasale du masque avec les deux mains pour l'ajuster au niveau du nez
6. Enlever le masque par derrière (ne pas toucher le devant du masque) et le jeter immédiatement dans une poubelle fermée.